

Sicherheitshinweise

Warnhinweise

- **Verwenden Sie den INHALO DSI NASAL nicht im Falle einer Lungenentzündung!**
- Bei schweren und chronischen Erkrankungen der Atemwege, Herzerkrankungen und/oder Bluthochdruck sowie Schwangerschaft, stimmen Sie eine Verwendung vorher mit Ihrem Arzt oder Apotheker ab!
- Von einer gemeinsamen Nutzung des Gerätes von mehreren Personen wird abgeraten! (Gegeninfektion!)
- Der INHALO DSI NASAL ist kein Ersatz für eine Medikation und sollte im Falle einer parallelen medikamentösen Therapie, in Abstimmung mit Ihrem Arzt oder Apotheker erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen!
- Nicht schütteln oder fallen lassen!
- **ACHTUNG: Enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Erstickungsgefahr! Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren!** Nicht für Kinder unter 2 Jahren geeignet! Bei Kindern unter 5 Jahren wird die Verwendung des INHALO DSI Nasal mit Aroma-Stift nicht empfohlen! Bei Kindern unter 5 Jahren wird eine Aufsicht durch Erwachsene bei der Anwendung empfohlen!
- Verwenden Sie den Aroma-Stift des INHALO DSI NASAL nicht, wenn Sie an einer Überempfindlichkeit gegen ätherisches Öle leiden! Nach dem Einlegen des Aroma-Sticks, bitte sorgfältig Hände waschen! Etwaige ätherische Ölrückstände an den Fingern können, bei Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten, vorübergehende Reizungen hervorrufen!