

### **DE Arthrimed – Arthritis Schmerzpad mit Bandage**

Dieses Medizinprodukt ist zur Schmerzlinderung bei Arthrose vorgesehen. Es regt die Durchblutung an und lindert dadurch die Schmerzen.

**GEBRAUCHSANWEISUNG:** Öffnen Sie die Verpackung und platzieren Sie das Schmerzpad in der Bandage. Dazu schieben Sie das Pad in eine der beiden Öffnungen der Bandage. Achtung: Das Pad darf nicht direkt auf die Haut aufgebracht werden. Positionieren Sie die Bandage an der Stelle, an der die Schmerzen am stärksten sind. Das Pad heizt sich langsam auf. Es dauert etwa 30 Minuten, bis die maximale Temperatur erreicht ist. Das Pad gibt 8 Stunden lang Wärme ab. Das Pad ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen. Bei Unwohlsein ist das Pad sofort abzunehmen.

**Zusammensetzung:** Eisenpulver, Polyacrylsäure, Vermiculit, Aktivkohle, Wasser, Natriumchlorid.

**Inhalt:** 1 Bandage & 8 Schmerz pads

#### **Achtung**

- Bei unsachgemäßem Gebrauch kann das Pad selbst bei niedrigen Temperaturen Verbrennungen verursachen.
- Beachten Sie die Anweisungen und überprüfen Sie die betreffenden Hautpartien alle 15 Minuten.
- Üben Sie keinen Druck auf das Pad aus, indem Sie sich beispielsweise darauf setzen oder legen.
- Nicht in Kombination mit anderen Geräten oder Hilfsmitteln verwenden, die Wärme erzeugen.
- Nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren.
- Die im Schmerzpad enthaltenen Stoffe können bei direktem Kontakt mit der Haut oder den Augen schädlich sein.
- Bei direktem Haut- oder Augenkontakt mit den Inhaltsstoffen sofort mit Wasser abspülen. Suchen Sie in beiden Fällen sofort einen Arzt auf.